

SAUVEGARDE DES DONNEES SUR SUPPORT DE STOCKAGE

1/ Lorsque l'échographe est en marche : brancher le support de stockage USB sur une des 2 prises USB latérales de l'échographe, ou insérer le disque CD/DVD.



2/ Presser la touche « Patient ».

3/ Dans la barre de menu verticale gauche, cliquer sur « Transf. Donn. » / « Data Transfer » (pour les versions en anglais).

Onglet pour le transfert

Exporter

Support de stockage

Patient ID	Last Name	First Name	Last Exam	Copied	Status Msg	Img. size
wz23			05/29/2006			None
tosilkey			05/30/2006			None
sfsdsd			05/29/2006			None
qwqw			05/29/2006			None
qw124			05/29/2006			None
mimalkjdoi			05/29/2006			None
jfdadu			05/29/2006			None
fdhgr			05/30/2006			None
ere			05/30/2006			None
dkwer3			05/29/2006			None
df154			05/30/2006			None
dfir			05/29/2006			None
ddidertgrey			05/30/2006			None
ddles			05/30/2006			None
23232			05/29/2006			None
2323			05/29/2006			None

4/ Sélectionner l'une des « Tâches » / « Tasks »:

- « Exporter » / « Export » : les examens seront transférés au format DICOM, sélectionner ensuite le support de stockage, clé USB (« USB Drive 1 »), disque dur externe, CD ou DVD (« Removable CD Archive » / « Removable CD/DVD »).
- « MPEG vue » : pour un transfert au format « mpeg », de la même manière que pour « Exporter », choisir le support de stockage.

La liste des patients apparaît :

Liste des examens enregistrés

Sélectionner tout les patients

Patient ID	Last Name	First Name	Last Exam	Copied	Status Msg	Img. size
we23			05/29/2006		None	
tosdkey			05/30/2006		None	
sdstdsd			05/29/2006		None	
qwqw			05/29/2006		None	
qw124			05/29/2006		None	
mimalkkdoi			05/29/2006		None	
jfidadu			05/29/2006		None	
fdhgr			05/30/2006		None	
ere			05/30/2006		None	
dklwer3			05/29/2006		None	
df154			05/30/2006		None	
ddfr			05/29/2006		None	
dddertgrey			05/30/2006		None	
dddee			05/30/2006		None	
23232			05/29/2006		None	
2323			05/29/2006		None	

5/ Choisir les examens à transférer sur le disque dur externe :

- Pour sélectionner la totalité des patients : cliquer sur « Sélectionner tout » / « Select All ».
- Pour sélectionner certains examens dans la liste : maintenir la touche « Ctrl » du clavier, puis cliquer sur les patients concernés.

6/ Enfin, cliquer sur « Transfert » / « Transfer » pour exporter les données sur le support.

Transférer vers le support

ID Patient	Nom	Prénom	Dernier examen	Copié	Msg statut	Taille image
030812-095214			03/08/2012 09:52:			10.4 MB
030812-103558	Essai		03/08/2012 10:36:			Aucun
030812-103730	Notreau		03/08/2012 10:37:			Aucun
030812-104002	Test		03/08/2012 10:40:			Aucun
TEST LABO			10/04/2012 17:37:			72.7 MB

Une fois l'opération terminée, les examens apparaissent dans la partie correspondant au support de stockage USB et la case « Copié » / « Copied » est cochée.

The screenshot displays the LOGIQ E software interface. The top section shows search filters for patient information (ID Patient, Nom, Prénom) and a search criteria dropdown set to 'Descript. examen'. Below this is a table with columns: ID Patient, Nom, Prénom, Dernier examen, Copié, Msg statut, and Taille image. The 'Copié' column contains checkboxes, all of which are checked. A red box highlights this column, and a red arrow points to it from the text 'Confirmation du transfert'. Below the table are buttons for 'électionner tout', 'Transfert', and 'Données sélectionnées: 0.0 MB'. The bottom section shows a search criteria dropdown set to 'ID Patient' and a 'Masquer' button. Below this is another table with columns: ID Patient, Nom, Prénom, Né(e) le, Sexe, Dernier examen, and Taille image. A red box highlights this table, and a red arrow points to it from the text 'Liste des examens transférés'.

ID Patient	Nom	Prénom	Dernier examen	Copié	Msg statut	Taille image
030812-095214			03/08/2012 09:52:	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	10.4 MB
030812-103558	Essai		03/08/2012 10:36:	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	Aucun
030812-103730	Nouveau		03/08/2012 10:37:	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	Aucun
030812-104002	Test		03/08/2012 10:40:	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	Aucun
TEST LABO			10/04/2012 17:37:	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	72.7 MB

ID Patient	Nom	Prénom	Né(e) le	Sexe	Dernier examen	Taille image
030812-095214				N	03/08/2012 09:52:16	10.4 MB
030812-103558	Essai			N	03/08/2012 10:36:12	Aucun
030812-103730	Nouveau			N	03/08/2012 10:37:36	Aucun
030812-104002	Test			N	03/08/2012 10:40:20	Aucun
TEST LABO				N	10/04/2012 17:37:26	72.7 MB

Confirmation du transfert

Liste des examens transférés

EFFACEMENT DES DONNEES DU DISQUE INTERNE

Si l'effacement succède à un transfert sur un support externe, il est fortement recommandé de vérifier que toutes les données sont bien présentes sur celui-ci avant d'entamer la procédure de suppression.

1/ Presser la touche « Patient ».



La liste des examens est visible directement dans la fenêtre « Affichage patients » / « Patient view ».

GE Healthcare

Patient ID: [] Last Name: [] DOB: []
 First Name: [] Age: []
 Middle Name: [] Sex: female male

ABD OB GYN CARD VAS UR PED SM P

Height: [] cm Accession #: []
 Weight: [] kg Exam Description: []
 BSA: [] m² Perf.Physician: []
 Ref.Physician: []
 Operator: ADM

Images Clear

Patient View

Search key: Patient ID string: [] Clear Hide

Patient ID	Last Name	First Name	Birthdate	Sex	Last Exam	Img. size
XVUJMcU	jllPC0S4idZ		01/01/2007	F	01/17/2008 06:43:19	294 MB
x12fof	S7colKneof	Fx3m	01/01/2007	F	01/17/2008 06:32:42	109 MB
tlPpk	ckVC	BJRMKPrSGop2	01/01/2007	F	01/15/2008 06:25:42	452 MB
ssU19scZ	HAgjrdKN2Z	XDV10	01/01/2007	F	01/17/2008 09:04:29	142 MB
ResjRQDEA	wURSe	EL	01/01/2007	F	01/17/2008 00:52:21	161 MB
Ody	VWCVStv1r	Dx19pS	01/01/2007	F	01/15/2008 12:26:42	375 MB
Pdc17pNL	vW0MqJ80pdU	TlobEp2P2	01/01/2007	F	01/17/2008 00:44:51	190 MB
PCGGR1	953u	TMPriutlIPyeX	01/01/2007	F	01/15/2008 13:30:01	82.3 MB
Mellakozr	jMll	5dy	01/01/2007	F	01/16/2008 23:32:05	105 MB
L3YwSapAG	D1Tel bMh5DL	AARMAOcBggwC	01/01/2007	F	01/16/2008 23:01:16	105 MB
k9N6s5	w0YgA2Vlba	NCY	01/01/2007	F	01/17/2008 08:48:46	250 MB
Hnu3SK0Zp	IX	lujmZdx	01/01/2007	F	01/17/2008 10:35:46	172 MB
HnuBN	oKE9ScSIC	XVO3	01/01/2007	F	01/17/2008 05:21:08	105 MB

EZBackup EZMove

Dataflow: Local Archive int. HD

Delete Lock Show: All 18 / 19

Liste des examens disponibles

Supprimer les examens choisis

3/ Choisir les examens à supprimer du Disque Dur :

- Pour supprimer la totalité des patients : cliquer sur le premier de la liste puis maintenir la touche « Shift » du clavier, sélectionner ensuite le dernier dossier (faire défiler via l'ascenseur si nécessaire) et valider « Effacer » / « Delete ».
- Pour supprimer certains examens dans la liste : maintenir la touche « Ctrl » du clavier, puis cliquer sur les patients concernés et terminer avec « Effacer » / « Delete ».

Une fenêtre apparaît, demandant la confirmation de l'opération, cliquer sur « Ok ».

EJECTION DU SUPPORT DE STOCKAGE USB OU CD/DVD

1/ Appuyer sur la touche « Eject » du clavier.



2/ Sélectionner le support de stockage USB ou le CD/DVD.



Pour toute information complémentaire relative aux procédures de transfert de données pour la gamme LOGIQ, contacter :

Irène WEULERSSE – Irene.Weulersse@ge.com